

## 5. Alarmer og sikkerhedsfunktioner

Hvis en alarm aktiveres (bortset fra alarmerne for tomt batteri og pumpefejl):



**Lydløs alarm (om nødvendigt)**


Søg efter årsagen, og foretag den rette handling



**Udløs alarmerne**




**Genoptag tilførslen**

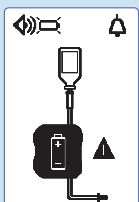


**Batteri afladt**

Tilslut straks pumpen til strømforsyningen.

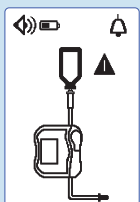


**Alarm for tomt pose/luft i sæt**

Skift beholder og sæt, eller se efter luftbobler.

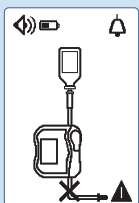


**Alarm for nedadgående okklusion**

Kontrollér, at der er fri gennemgang i sættet efter pumpen på patientsiden.

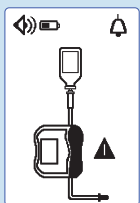


**Alarm for åben dør**

Luk pumpeøren.

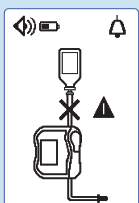


**Alarm for opadgående okklusion**

Kontrollér, at der er fri gennemgang i sættet mellem beholderen og pumpen.

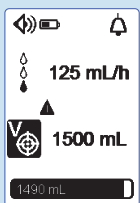


**Meddelelse om at ønsket volumen næsten er nået**

Fortsæt tilførsel, eller afslut tilførsel.

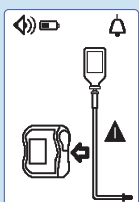


**Alarm for isat sæt**

Kontrollér sættets position over og under pumpemekanismen, og indsæt sættet korrekt.

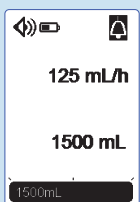

**Alarm for ønsket volumen er nået**

Afslut tilførslen.

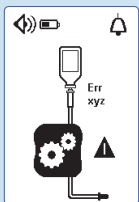

**Alarm om pumpefejl**

Notér den tekniske fejlkode (Err xyz), og kontakt personalet, der vedligeholder pumpen.




**Startpåmindelse**

Fortsæt til næste trin, eller sluk pumpen.



ZZ10318

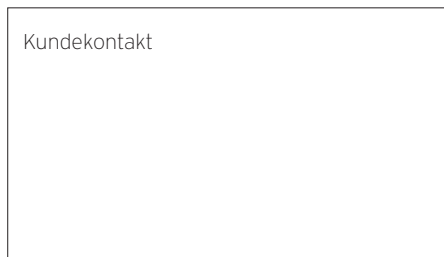

PI210318-B Amika ORG\_DAN  
Revisionsdato: Juli 2021

Det er obligatorisk at læse brugervejledningen, inden dette apparat tages i brug. Amika er et registreret varemærke tilhørende Fresenius Kabi i udvalgte lande. På grund af vores politik om løbende produktudvikling samt ændringer i standarder kan de beskrevne funktioner ændres eller ikke fås i dit land. Kontakt din salgsrepræsentant for at få de senest opdaterede oplysninger. Dette medicinske udstyr er reguleret af sundhedsmyndighederne. Se den respektive CE-overensstemmelseserklæring for det relevante direktiv eller den gældende forordning om medicinsk udstyr. Kontakt din Fresenius Kabi-repræsentant for yderligere oplysninger. Billeder er ikke kontraktmæssige.

**FRESENIUS  
KABI**  
caring for life

Fresenius Kabi AG  
Else-Kröner-Str. 1  
61352 Bad Homburg  
GERMANY  
Phone: +49 (0) 6172 / 686-0  
www.fresenius-kabi.com

CE 0123

**FRESENIUS  
KABI**  
caring for life



# Amika


## Enteral ernæringspumpe

### Quickguide



Bemærk: Denne quickguide er ikke beregnet til at give omfattende instruktioner i opsætning og betjening af Amika enteral ernæringspumpe.

## 1. Installation af sættet i pumpen

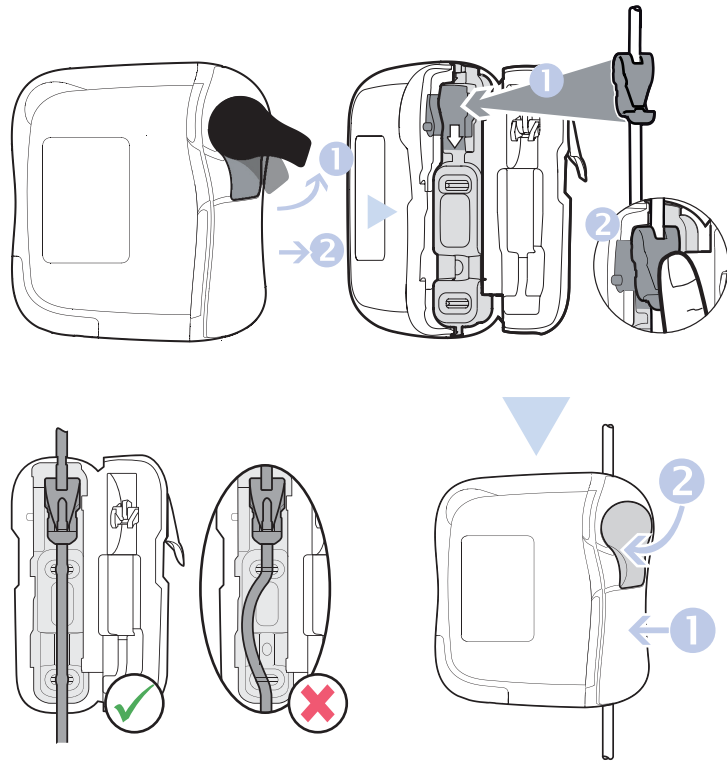


## 2. Symbolforklaring




## 3. Anvendelsesmuligheder

### 3.1 Tænd for pumpen

### 3.2 Fyld sættet

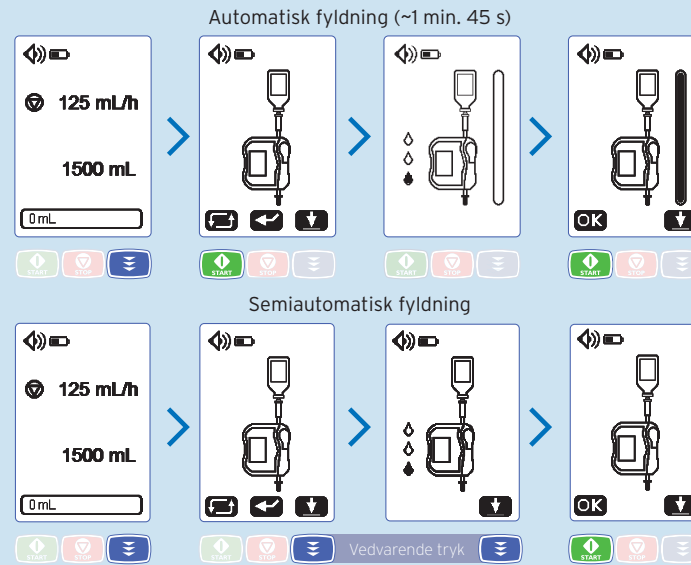

### 3.3 Indstil indløbs-hastigheden (ml/h)

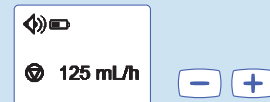


### 3.4 Indstil ønsket volumen (ml)



### 3.5 Start tilførslen (fyld sættet først)



### 3.6 Stop tilførslen

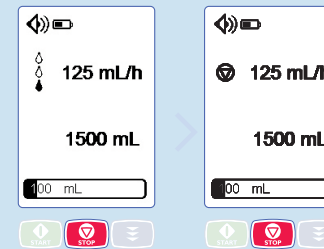

> 2 sek: Nulstilling af forløbsbjælken

Tastaturlås > 2 s

Sluk pumpen > 2 s

## 4. Menu

Stop tilførslen



og tryk derefter på MENU-tasten



For at rulle op

For at rulle ned

Vælg en menu, eller godkend en handling



Tilbage til den forrige skærm



Ønsket volumen aktivering/deaktivering



Nattilstand aktivering/deaktivering



Lydindstillinger



Indstillingslås aktivering/deaktivering \*



Kumulativ tæller for tilførselsvolumen



Alarmhistorik



Tilførselshistorik



Kontrast-/lysstyrkeindstillinger



Indstilling for tid imellem 2 alarmlyde\*



Indstilling for tid imellem meddelelse om at ønsket volumen næsten er nået og ønsket volumen er nået



Teknisk information

\* adgangskode påkrævet